

INZENDEN VAN OORBIOPTEN VOOR MERKERONDERZOEK

ALLFLEX

BIOPTOORMERKEN

1

Doe de oormerken in de oren van het kalf



2

U heeft nu één biopt voorzien van een kleurloze vloeistof



Controleer of het buisje gevuld is en controleer de rasbalk (min 75% HF).

3

Voor **BVD- en DNA-onderzoek** stop het buisje in het plastic zakje en stuur dit naar de **GD**



Vul op het inzendformulier bij de GD of bij digitale inschrijving via VeeOnline duidelijk in dat ze doorgestuurd moeten worden naar CRV voor merkerstest.

4

Voor **alleen DNA-onderzoek** stop het buisje in het plastic zakje en stuur dit naar **CRV**



Vraag kosteloos retourenveloppen aan in onze webshop. Voorzie de envelop van uw UBN-nummer.

5

De monsters komen aan in het laboratorium



6

De monsters worden onderzocht in het laboratorium



7

De BVD-uitslag volgt via de GD, de DNA-merkeruitslag via CRV



www.hut.nl

QFLEX

BIOPTOORMERKEN

1

Doe de oormerken in de oren van het kalf



2

U heeft nu twee oorbiopten



Controleer of de buisjes gevuld zijn en controleer de rasbalk (minimaal 75% HF).

3

Stop het **witte buisje** in het plastic zakje en stuur dit in een envelop naar de **GD of Bflex**



Laat u het BVD-onderzoek bij de GD uitvoeren, voeg dan het GD-inzendformulier toe of schrijf digitaal in via GD VeeOnline.

4

Stop het **roze buisje** in het plastic zakje en stuur dit in een envelop naar **CRV**



Voorzie de envelop van uw UBN-nummer.

5

De monsters komen aan in het laboratorium



6

De monsters worden onderzocht in het laboratorium



7

De BVD-uitslag volgt via de GD, de DNA-merkeruitslag via CRV



www.bflexoormerken.nl